

GUÍA DE USO DE GRANULOX®



Clave de Compendio Nacional Insumos
para la Salud: 060.960.0011

1. ¿Qué tipos de heridas se pueden tratar con Granulox®?

Tipo de herida	Granulox®	
	Sí	No
Lesión en la pierna	●	
Lesión del pie	●	
Lesión por presión	●	
Cicatrización de heridas por segunda intención	●	

Leyenda:


●
Recomendado

✗
No recomendado

●
Sí, pero consulte a un experto

●
NO, pero consulte a un experto

2. ¿Desbridamiento (preparación del lecho de la herida antes de la aplicación de Granulox®)?

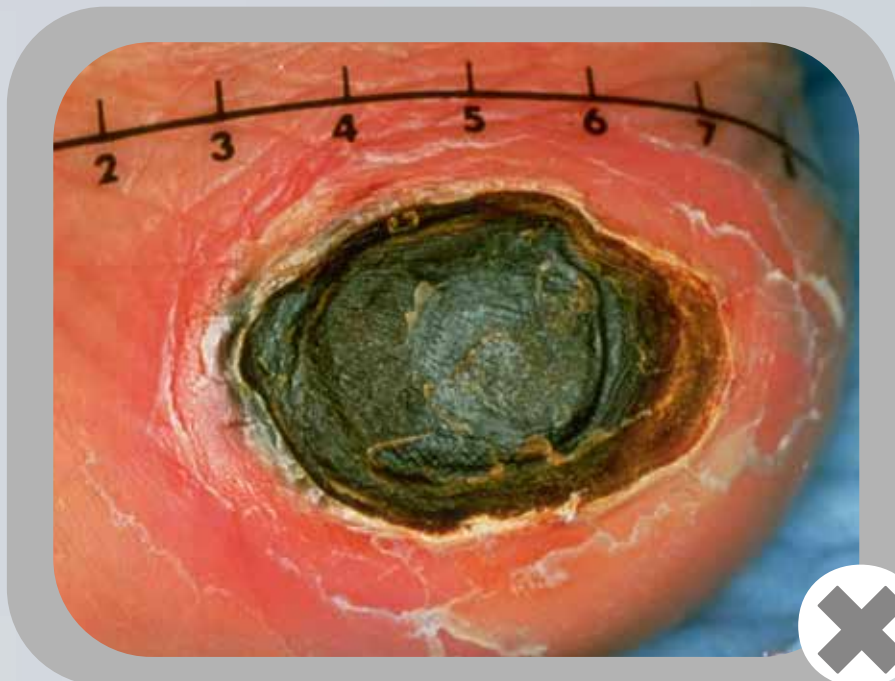

Desbridamiento y limpieza



Estado de la herida	Preparación adecuada del lecho de la herida (Desbridamiento y/o limpieza)	Granulox® Sí / No
Infección, Colonización ⁽¹⁾	Obligatorio	●
Esfacelo		
Fibrina		
Biopelícula		
Necrosis ⁽²⁾		
Exudado		
Cavitación	Reconsideración después del tratamiento quirúrgico adecuado	✗
Tejido desvitalizado		

(1) Siempre que se realice la **WBP= Wound Bed Preparation / Preparación del lecho de la herida**, incluido el desbridamiento, la limpieza y el control de infecciones marcados como obligatorios en la segunda columna
(2) Siempre que se realice una limpieza adecuada, incluido el desbridamiento y la limpieza, como se ve en la segunda columna marcada como obligatoria.

3. ¿Qué tipo de enjuague?

Enjuague/tratamiento antimicrobiano	Granulox®	
	Dejar puesto ⁽³⁾	Enjuagar ⁽⁴⁾
Solución / gel / ungüento		
Clorhexidina		●
Solución hipoclorosa	●	
Antibiótico local	●	●
Octenidina		●
Polihexanida (PHMB)	●	
PVP-yodo		●
Solución de Ringer	●	
Solución de cloruro de sodio	●	
Agua	●	

(3) Dejar actuar = No es necesario enjuagar solución fisiológica cuando se utiliza Granulox®
(4) Enjuague = Es necesario enjuagar con solución fisiológica antes de la aplicación de Granulox®

4. ¿Qué tipo de apósito usar?

Apósito	Granulox®	
	Sí	No
Alginato	●	
Colágeno	●	
Apósito con película (película de PU) no oclusiva	●	
Apósito con película (película de PU) oclusiva		✗
Apósito de espuma (hidropolímero)	●	
Gasa	●	
Hidrocoloide		✗
Hidrofibra	●	
Hidrogel	●	
Polímero superabsorbente	●	

PU =Poliuretano

● Todos los apósitos semipermeables o permeables son compatibles.

✗ Evite el vendaje oclusivo

5. ¿Es compatible con otras terapias que recibe el paciente?


Terapia	Granulox®	
	Sí	No
Compresión	●	
TOHB (Terapia de Oxígeno Hiperbárico)	●	
NPWT (Terapia de Presión Negativa en Heridas) ⁽⁵⁾	●	
Injerto de piel	●	
Antibiótico sistémico	●	

(5) Aplicar antes y después de NPWT (no durante el tratamiento)

6. ¿Qué fases de curación?

Fase de curación	Granulox®	
	Sí	No
Inflamación	●	
Granulación	●	
Epitelización	●	
Remodelación		✗

Después de la preparación del lecho de la herida hasta que la herida esté cerrada

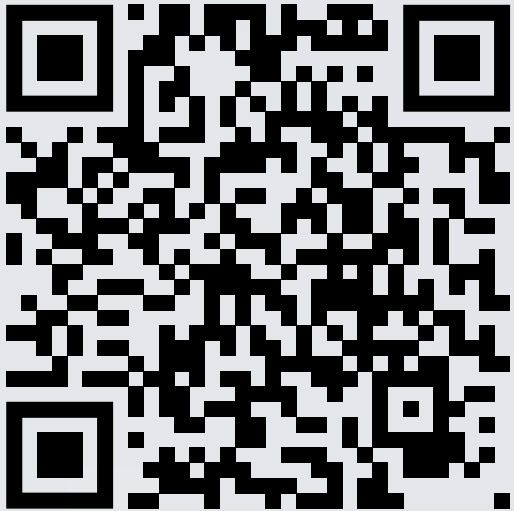

¡Escanee y conoce más sobre Granulox!
Obtenga más información en www.molnlycke.lat

Las marcas comerciales, los nombres y los logotipos de Mölnlycke® y Granulox® están registrados a nivel mundial a nombre de una o más de las empresas del grupo Mölnlycke Health Care. © 2023 Mölnlycke Health Care. Todos los derechos reservados. Registro Sanitario: 1942C2011 SSA

